


# ВАКЦИНАТОР SOCOREX® ULTRA 1810


## Краткое руководство

### Положение корпуса

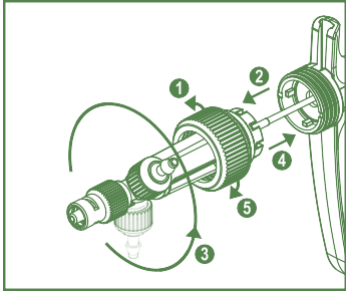


Отрегулируйте положение корпуса.


### Установка трубки

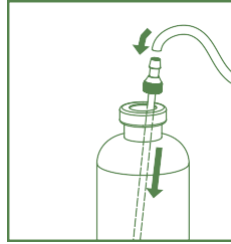

Вставьте иглу для подачи препарата. Подсоедините трубку.

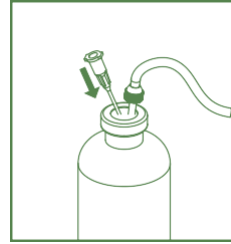


Вставьте дренажную канюлю.

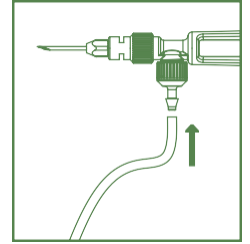


Подсоедините трубку к вакцилятору.

### Подготовка

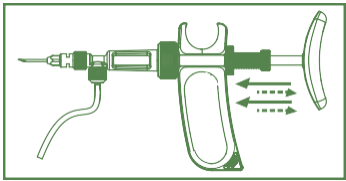


Активируйте для всасывания и вытеснения жидкости.

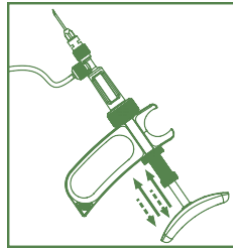


Удалите пузырьки воздуха.


### Установка объема

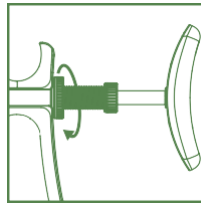

Разблокируйте.

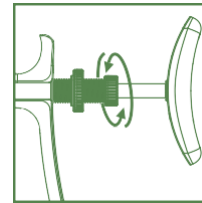


Поверните муфту, чтобы дать ход поршню.

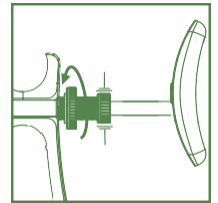


Заблокируйте, удерживая муфту.

### В случае засорения клапана


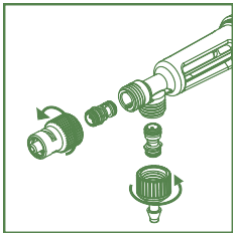


Открутите и промойте клапаны. Ничего не вставляйте в гильзы клапанов.

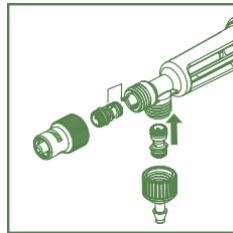


Соберите в соответствии с механическим кодированием.

### Объем

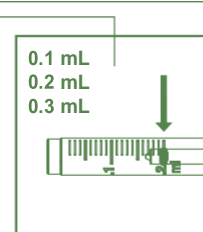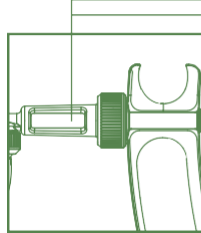

Уплотнительное кольцо на делении шкалы.

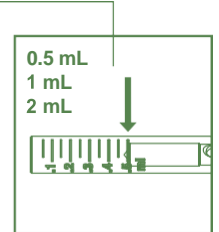


Край поршня на делении шкалы.

### Очистка и промывка



Слейте препарат. Промойте водой/моющим средством.

### Разборка и очистка

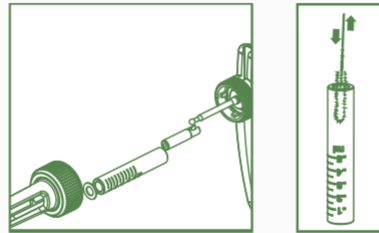


Открутите гайку, разберите на детали, очистите и высушите их.

### Замена уплотнительного кольца поршня




Аккуратно извлеките.

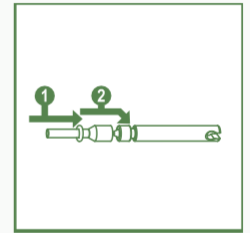


Вставьте новое смазанное кольцо в паз по направляющей.


### Сборка

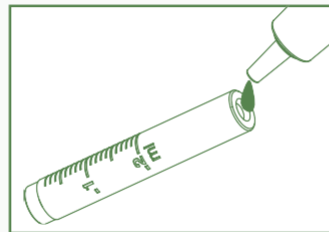

Смажьте входное отверстие цилиндра.

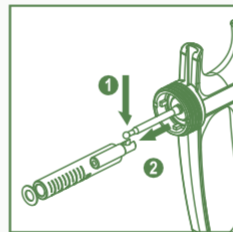

Установите поршень в цилиндр. Соедините стержень.

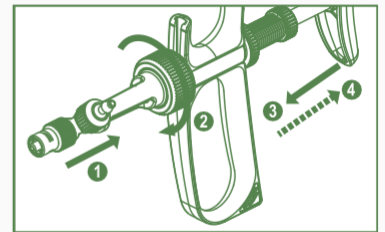

Соедините корпус в выдвинутом положении.



I.GUIDE.1810.E – D0223