



Вакцинаторы SOCOREX® classic 167/187/287

Краткое руководство


Установка объема

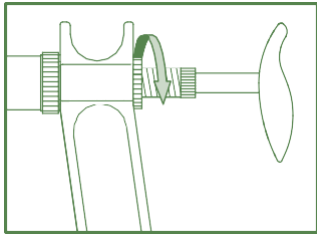

Открутите зажимную гайку.

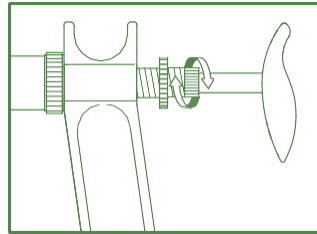


Отрегулируйте объем поршнем.

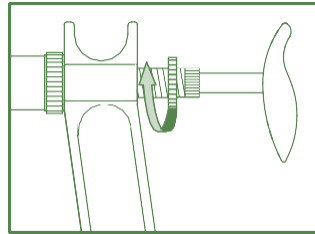


Затяните гайку.

Положение корпуса

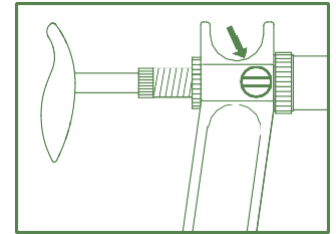

Отрегулируйте положение корпуса/ручки с помощью винта на боковой стороне ручки.


Установка аксессуаров: Трубка

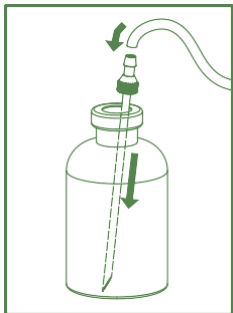

Вставьте иглу для подачи препарата. Подсоедините трубку.




Вставьте дренажную канюлю.

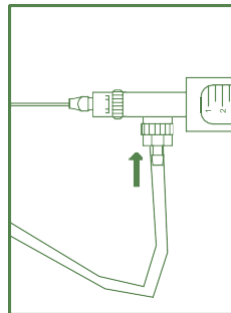


Подсоедините трубку к вакцинатору.

Держатель флакона

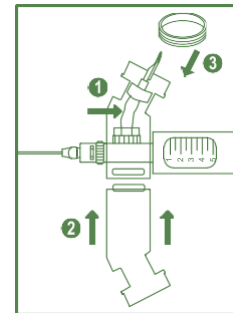


Вставьте штуцер и иглу, соберите детали.

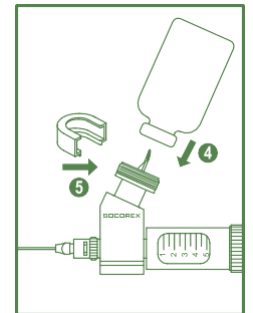


Проткните резиновую пробку флакона, закрепите флакон.

Подготовка

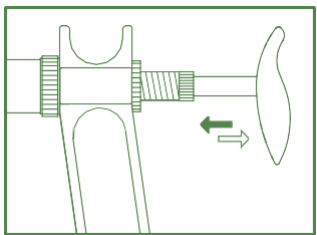


Подкачайте жидкость к игле.

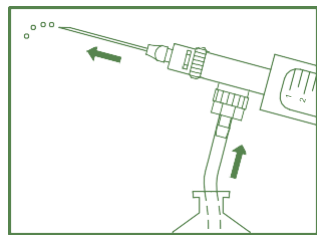


Активируйте в вертикальном положении до вытеснения жидкости и устранения пузырьков воздуха.

В случае засорения клапанов

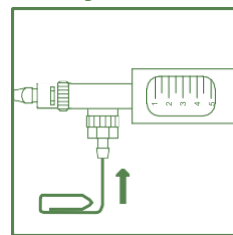


Вставьте небольшую скрепку и надавите, чтобы ослабить шарик.

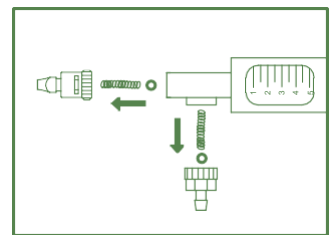


Если этого недостаточно, разберите клапаны и очистите их.


Ежедневное обслуживание: промывка, разборка и очистка.

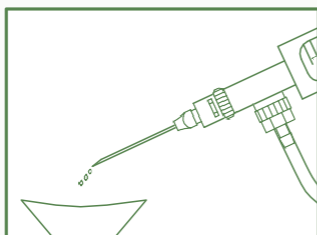


Тщательно промойте теплой водой.

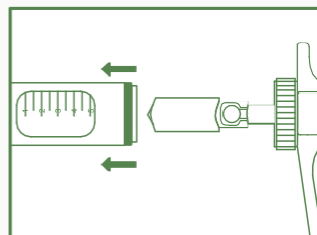

Открутите корпус и снимите его.

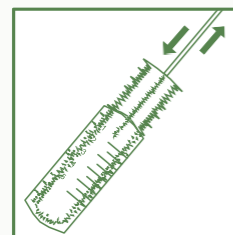


Очистите стеклянный цилиндр щеткой.

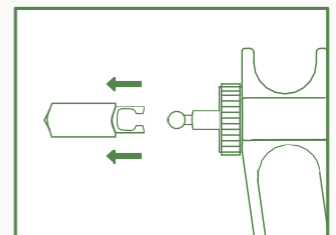


Отсоедините поршень, очистите и просушите его.


Сборка

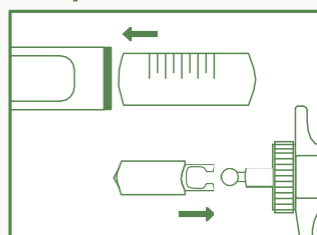

Аккуратно вставьте стеклянный цилиндр в корпус. Прикрепите поршень к стержню ручки.

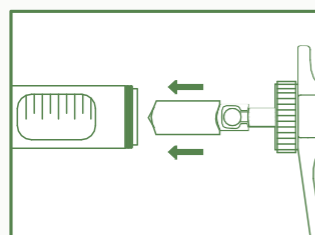

Осторожно вставьте поршень в стеклянный цилиндр, затем прикрутите корпус.

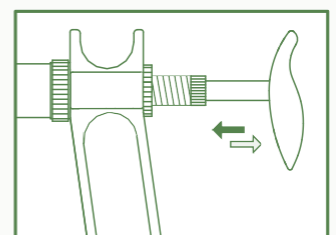

Активируйте один или два раза, чтобы проверить корректность работы.



I.SYR.E - F0423